

卓上小型高圧蒸気滅菌器 オートクレーブ

Autoclave LA-220

簡単操作で作業効率アップ

安心の
フルオート
タイプ



簡単操作で
時間と温度を
ラクラク設定



送風ポンプ内蔵で
いつでも
快適な乾燥



スタートから
終了まで
デジタル表示



前回の設定状態を
オートキープ



用途にあわせた
ワンタッチ
切り替え操作

※LA-220は、販売名HF220の愛称です。

作業手順



1 準備

電源スイッチを「入」にします。被滅菌物を入れ、ワンタッチドアを閉めます。

Point スライド式のドアロックが確実にドアをロック。

2 滅菌

滅菌温度を自由にセレクト。お好みで滅菌時間も設定できます。

Point 温度切り替え (121℃:20分/132℃:5分の標準設定) はキーを押すだけ。

3 乾燥

乾燥時間を自由に設定できます。(0~90分まで変更可)

Point 送風ポンプ式乾燥を採用しています。

4 完了


終了音が鳴りましたら、圧力計の針が「0」であることを確認して、ドアを開け被滅菌物を取り出します。

Point 前回の設定をキープしていますので、同じ設定の場合、再度設定をする必要はありません。

作業行程はすべてデジタル表示されます。スタートから終了まで、確認しながら安心して使用できます。

高圧蒸気滅菌器 LA-220

- 外寸法 / W430×D453×H367mm (ドアノブの奥行36mm含まず、ゴム足の高さ27mm)
- 缶体有効寸法 / 220×330mm
- 収容力 / 滅菌バッグ専用網かご / 専用ステンレス角カスト / 18cm丸カスト
- 操作方法 / ワンタッチ全自動 (前回使用設定を保持)
- 滅菌温度 / 121℃ (20分~90分:変更可) / 132℃切替 (5分~90分:変更可)
- 温度制御 / マイコン・サーミスタ方式
- 乾燥方式 / 送風ブロー方式 (90分まで変更可) 乾燥のみ可
- 表示方式 / デジタル方式
- 安全装置 / 空焚防止装置・安全弁・圧力安全スイッチ・過電流保護ブレーカー・温度過昇防止装置
- 電源 / AC100V 50/60Hz
- 消費電力 / 1,440VA
- 質量 / 27kg
- 付属品 / スノコ板1枚・排水フィルター1個・ナイロンタワシ1個
- JANコード / 4571142843313
- 一般的名称 / 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 (JMDNコード 40547020)
- 医療機器の種類 / 管理医療機器 (クラスII)・特定保守管理医療機器
- 医療機器製造販売承認番号 / 21900BZX00242000
- 販売名 / HF220
- 製造販売元 / ヒルソン・デック株式会社

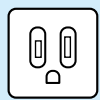

コンセントはアース付3P15Aをご使用ください。

別売オプション



滅菌バッグ専用網かご
寸法:170(W)×310(D)×100(H)mm



専用ステンレス角カスト
寸法:160(W)×310(D)×127(H)mm



18cm丸カスト
寸法:180(φ)×146(H)mm

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

修理専用ダイヤル

コールセンター 0570-066-787

〈受付時間〉 9:00~17:30 (土日祝日/年末年始/夏季休暇除く)



キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
<https://lifecare.medical.canon>

本社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目13番29号 キヤノン港南ビル (03) 6719-7040